

ПРОГРАММА ФОНОФОРЕЗ ANTI- AGE


ПОКАЗАНИЯ

- Рубцовые изменения, постакне: фореz рассасывающих и улучшающих микроциркуляцию гелей на область рубцов, поствоспалительных элементов
- Возрастные изменения (морщины, птоз): фореz препаратов, содержащих антиоксиданты, ультра- и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, пептиды-миорелаксанты, витамины А, С, Е
- Нарушение микроциркуляции, атоничная, тусклая кожа, купероз
- Обезвоженность кожи, нарушение барьерной функции кожи: фореz препаратов с низко - и высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, средств, восстанавливающих гидролипидный барьер кожи
- Отёчность
- Чувствительная кожа: фореz препаратов, содержащих успокаивающие и иммуностимулирующие компоненты, такие как сок алоэ вера, d-пантенол, экстракт календулы и т.д.

Возможными побочными эффектами процедуры может быть перегрев тканей при использовании постоянного режима и несоблюдении техники проведения манипуляции, а также аллергические реакции на вводимые компоненты.

ПРОТИВОКАЗАНИЯ

- Индивидуальная непереносимость лекарственного вещества
- Новообразования
- Декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности
- Системные болезни крови, кровотечения
- Туберкулез

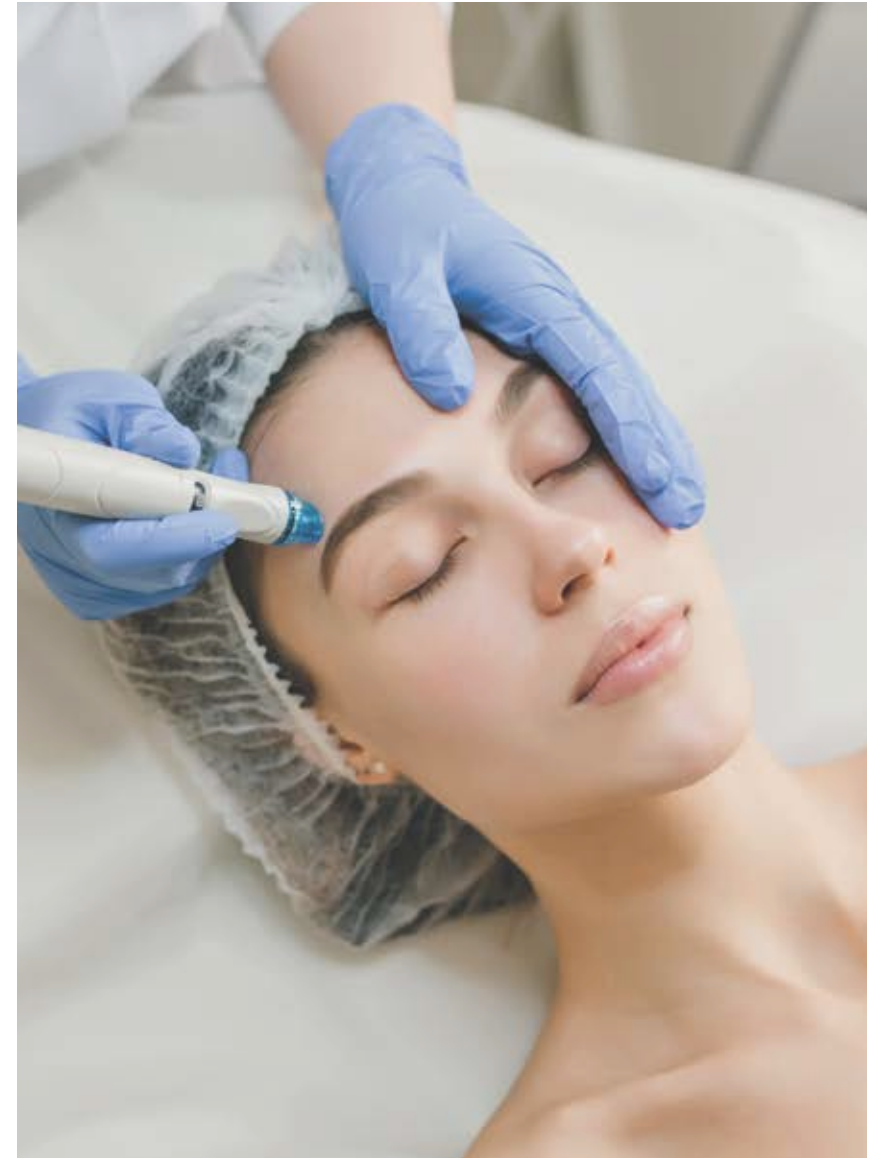

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОДУКТАХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ:



экстракт алоэ вера



бромелайн



экстракт плодов
лимонника лимонного



масло сладкого миндаля



экстракт яблока



экстракт зеленого чая



аллантиин



комплекс коллоидного
золота



коллаген



D-пантенол



гидрогенизированное
касторовое масло




ниацинамид




трифторацетил-трипептид-2



экстракт плодов ананаса

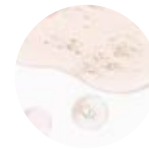

АНА - кислоты

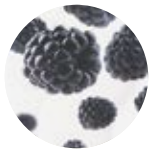

экстракт ежевики



гиалуроновая кислота



экстракт папайи

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:

1 ШАГ

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Тщательно удалите макияж мицеллярной водой. Нанесите очищающий гель для умывания на влажную кожу, вспеньте, проведите очищение. Удалите остатки с помощью салфеток.



арт. 0235



2 ШАГ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Нанесите гель-пилинг тонкой веерной кисточкой на кожу лица, начиная с менее чувствительных зон (время экспозиции 10 минут) под пленку. Затем смойте прохладной водой.



арт. 0238



3 ШАГ

ТОНИЗАЦИЯ

Нанесите тоник на ватный диск или салфеткой. Протрите кожу лица, шеи и декольте по массажным линиям.



арт. 0228



4 ШАГ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (ЛИЦО / ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ)

Нанесите немного сыворотки на кожу по массажным линиям до полного впитывания.



арт. 0229



5 ШАГ

ФОНОФОРЕЗ

Кистью нанести гель на подготовленную кожу лица



арт. 0249



6 ШАГ

МАСКА (ЛИЦО / ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ)

Нанесите маску на кожу, обходя область губ и век. Оставьте на 1–2 минуты. Остатки смойте водой.



арт. 0234



7 ШАГ

УХОД ВОКРУГ ГЛАЗ

Нанесите небольшое количество лифтинг-геля вокруг глаз.



арт. 0211



8 ШАГ

КРЕМ

Завершите процедуру. Нанесите на кожу по массажным линиям до полного впитывания.



арт. 0231



НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

№ п/п	Артикул	Продукт	Объем, мл	Расход, мл	Себестоимость, руб.
1	0235	Очищающий гель для умывания с гиалуроновой и молочной кислотами ACTIVE CLEANSER	400	2-3	6,3
2	0238	Энзимный гель-пилинг EXPERT	200	5	10,05
3	0228	Тоник лифтинг-эффект с гиалуроновой кислотой и зеленым чаем ANTI-AGE	200	2	7
4	0229	Сыворотка лифтинг эффект с пептидным комплексом PEPTIDE ACTIVE	30	1/3	19
5	0249	Гель для лица контактный токопроводящий с лифтинг-эффектом EXPERT	400	10	19,2
6	0234	Мезо-маска с коллагеном и двумя видами гиалуроновой кислоты COLLAGEN+	100	10-15	83,8
7	0211	Лифтинг-гель для век АНА-кислотами и ниацинамидом ANTI-AGE	25	1	16,7
8	0231	Крем интенсивно омолаживающий с двумя видами гиалуроновой кислоты ANTI-AGE	50	1-2	14,6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 мин
 СЕБЕСТОИМОСТЬ: 176,65 руб.